

Malaria: Colección de muestras para envío al LSPPR

1. Tomar la muestra antes de dar tratamiento.
 2. Muestra debe ser tomada en tubo de **EDTA (violeta)**. Una vez tomada la muestra se debe hacer dos laminillas gruesa y dos laminillas fina antes de una hora para evitar cambios en morfología. Estas laminillas deben estar debidamente cumplimentadas con nombre de paciente, fecha de toma de muestra y **teñidas**.
- ***Nota:** Laminillas finas y una de las laminillas de gota gruesa deben ser enviadas teñidas con **Wright-Giemsa**
3. Adicional enviar muestra de **EDTA (tubo violeta) a temperatura ambiente**. Tubo debe estar debidamente identificado.
 4. Enviar copia del resultado del "*peripheral smear*" obtenido con presencia o ausencia del parásito y el resultado automatizado del CBC.
 5. Enviar forma **CDC 50.34** debidamente cumplimentada. Importante incluir en la sección de data epidemiológica información de historial de viajes y residencia, tratamiento y los síntomas.

******Nota:** Si se ha dado tratamiento se puede tomar la muestra como está indicado pero tiene que especificar fecha de comienzo de tratamiento.

A veces es necesario tomar varias muestras en intervalos de 8-12 horas de 2 a 3 días por el ciclo de vida del parásito.

Envío de Muestra

1. Comunicarse con el Epidemiólogo de su región o Epidemiología Nivel Central
787-765-2929 x 3566 o 3552
2. Se reciben muestras en horas laborables L- V **8:00am – 3:00pm**
3. Incluir los resultados de laboratorio del CBC.
4. Entregar muestra a la siguiente dirección física:

Laboratorio de Salud Pública de PR - Departamento de Salud

Calle Periferal

Edificio A 2do piso

Antiguo Hospital de Psiquiatría

Bo. Monacillos Rio Piedras, PR 00935

Rev.07/22/2015 RIC